



Mode d'emploi

Visière *Basic* PROTEC

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE pour protection

DÉTAIL

- Serre-tête réalisé en injection plastique
- Visière perforée en LEXAN Polycarbonate 500 µ
- Élastique (non-fourni)

UTILISATION

Destiné aux personnels :

- Non soignants
- Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.

Ce matériel **ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2** dans un environnement chargé en virus.



Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l'absence d'homologation par la Direction générale de l'Armement (DGA), l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l'absence de compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE

Assemblez la visière transparente au serre-tête et **placez-la au-dessus des sourcils**.

Selon votre préférence, vous pouvez **associer un élastique** à l'arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.

Cette visière peut être combinée au **port d'un masque barrière**, d'une **charlotte** ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

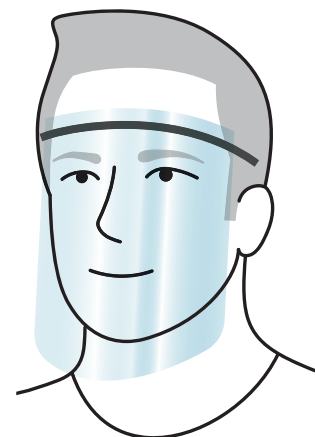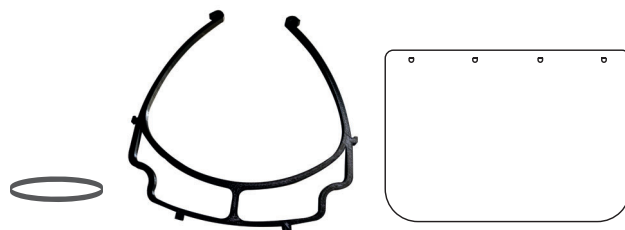

PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE

Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Procédez au nettoyage de la visière avec un **liquide vaisselle** (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un **mouchoir en papier**.

RAPPEL

Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :

- Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
- Eternuez dans le creux de votre coude
- Pas de poignées de mains ni d'embrassades
- Utilisez des mouchoirs jetables

